



LABORATOIRE DE FECAMP
5, rue Eugène Marchand – B.P. 176
76404 FECAMP CEDEX
Tél : 02 35 10 40 40
Fax : 02 35 28 53 72

Catalogue analytique

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
A1C	HEMOGLOBINE GLYQUEE	Sang	EDTA VIOLET 5 mL	1 j		TA	< 72 h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Non réalisé le week-end</i>						
ACC	Anticoagulants circulants ACC	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	3 j		TA	< 8h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : source stabiité: GEHT 2007 /cahier de bioforma n°20 /HAS 2013 (NACO) /HAS juillet 2011 /ABC 2014</i>						
ACE	ACE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	<7 j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus</i>						
ACFO	FOLATE	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j	A JEUN STRICT	TA	< 6h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : EVITER L HEMOLYSE</i>						
ACHBC	ANTICORPS ANTI HBC (HEPATITE B)	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	<24h
ACHBS	ANTICORPS ANTI HBS (hépatite B)	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 24h
ACL	ACIDE LACTIQUE	Sang	FLUORURE GRIS 5 mL	1 j		Dans la glace	< 30 min
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : A réaliser de préférence au laboratoire</i>						
AFP	AFP	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7j
AGGF	Agglutinines froides	Sang	SEC ROUGE 5 mL	3 j			aucune
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Contraintes pré-analytiques importantes, prélèvement à réaliser au laboratoire</i>						
AGHBS	ANTIGENE-HBS (hépatite B)	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	<1J
ALBS	ALBUMINEMIE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 6j
ALCO	ALCOOL	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 14j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Ne pas désinfecter avec alcool</i>						
ALLCR	ACIDE LACTIQUE LCR (urgent)	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON STERILE SANS BORATE	3 h		TA	< 24h
AMMO	AMMONIEMIE	Sang	EDTA VIOLET 5 mL	1 j		Dans la glace	15 min
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : A réaliser de préférence au laboratoire et plus particulièrement sur le site face à l'hôpital</i>						
AMY	AMYLASE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 4j
ANOG	Recherche anomalie des hématies	Sang	EDTA VIOLET 5 mL	1 j			
APOA1	Apolipoprotéine A 1	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	A jeun depuis 12h	TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : A JEUN STRICT</i>						
APOB	Apolipoprotéine B	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	A jeun depuis 12h	TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : A JEUN STRICT</i>						
AT3	ANTITHROMBINE 3 - ACTIVITE	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	1 j		TA	< 2j

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
ATHYR	ANTICOPRS ANTI THYROGLOBULINE	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 8j
ATPO	ANTICORPS ANTI THYROPEROXYDASE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 8j
AU	ACIDE URIQUE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	A jeun depuis 12h	TA	< 4j
BACT	RECHERCHE BACTERIE PARTICULIERE	Bactério: Urines ou Non spécifié	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	3 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever sur écouvillon avec milieu de transport sinon délai <2h à TA</i>						
BARB	PHENOBARBITAL	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 2j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Préciser le nom du médicament, la posologie ainsi que la date et l'heure de la dernière prise -Taux résiduel avant la première prise de la journée</i>						
BDI	BILIRUBINE DIRECTE ET INDIRECTE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	<8h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : GARDER A L ABRI DE LA LUMIERE si > 8h</i>						
BENZO	BENZODIAZÉPINE DOSAGE URINAIRE	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		2-8°C	< 2j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Réalisé après dépistage ou en direct si demandé</i>						
BLCR	LIQUIDE CEPHALORACHIDIEN BACT (urgent)	Bactério: Urines ou Non spécifié	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		TA	Immédiat
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Numéroté les flacons dans l'ordre de recueil</i>						
BLIP	BILAN LIPIDIQUE	Non spécifiée	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	A jeun depuis 12 h	TA	< 7j
BSEL	COPROCULTURE	Bactério: Urines ou Non spécifié	POT A SELLES	4 j		2-8°C	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <2h si conservation à TA CF fiche de prélèvement</i>						
BT	BILIRUBINE TOTALE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 8h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : GARDER A L ABRI DE LA LUMIERE si > 8h</i>						
BU	BACTERIO URINAIRE	Bactério: Urines ou Non spécifié		4 j		TA	<2h
	<i>Stabilité 12h si conservation à 2-8°C Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <24h à TA si recueil sur tube boraté CF fiche de prélèvement</i>						
BW	SYPHILIS DEPISTAGE	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 12h
C	CREATININE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 8h par défaut
C3	COMPLEMENT C3	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
C4	COMPLEMENT C4	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
CA	CALCIUM	Sang	SEC + GEL JAUNE 5 mL	1 j		TA	< 2j
CA125	CA-125	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 2j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus</i>						

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
CA153	CA 15-3	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus</i>						
CA199	CA 19-9	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus</i>						
CACO	CALCIUM CORRIGE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j			
CAIO	CALCIUM IONISE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	<15 mn
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Contraintes pré-analytiques importantes, prélèvement à réaliser au laboratoire</i>						
CARBA	CARBAMAZEPINE tégrétol	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	Prelever avant la nouvelle prise	TA	< 2j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Préciser le nom du médicament, la posologie ainsi que la date et l'heure de la dernière prise -Taux résiduel avant la première prise de la journée</i>						
CDIF	CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Bactério: Urines ou Non spécifié	POT A SELLES	2 j		2-8°C	<72h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <24h si conservation à TA</i>						
CDT	CDT - TRANSFERRINE DEFICIENTE EN CARBOXY	Sang	SEC ROUGE 5 mL	3 j		TA	< 72h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Analyse réalisée le Lundi - Mercredi et Vendredi</i>						
CH	CHOLESTEROL	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	A jeun depuis 12h	TA	< 7j
CL	CHLORE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
CLC	CLAIRANCE CREATININE MESUREE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j			
CLLCR	CLORE LCR (urgent)	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON STERILE SANS BORATE	3 h		TA	<24h
CORTA	CORTISOL Quelle qu'en soit l'heure	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	cycle nyctéméral prélever le matin à 8H00	TA	< 7 j
COVID_PCR_COVID FECAMP PCR FECAMP		Non spécifiée	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	2 j		2-8°C	<72h
	<i>Si conservation à température ambiante délai <8h</i>						
	<i>Compléter la fiche de renseignement clinique COVID-19</i>						
	<i>Utiliser le milieu de transport transmis par le laboratoire</i>						
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) :</i>						
	<i>D'autres milieux de transport sont également compatibles:</i>						
	<i>- Solution saline stérile</i>						
	<i>- Tris-EDTA</i>						
	<i>- Milieu M4RT</i>						
	<i>- Milieu Virocult</i>						
CPK	CREATINE PHOSPHO KINASE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7j

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
CRA	EXPECTORATION	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON URINES STERILE	4 j		2-8°C	<12h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <2h si conservation à TA CF fiche de prélèvement						
CTST	CAPACITE TOTALE DE FIXATION DE LA TRANSFERRINE	Sang	SEC + GEL JAUNE 5 mL	1 j	à jeun depuis 12h	TA	<24h
CYTU	CYTOLOGIE URINAIRE	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON URINES STERILE	1 j		TA	<2h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <24h à TA si recueil sur tube boraté CF fiche de prélèvement						
DDI	D-DIMERES	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	1 j		TA	< 1j
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : URGENT						
DEPA	DEPAKINE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	Prelever avant la nouvelle prise	TA	< 2j
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Préciser le nom du médicament, la posologie ainsi que la date et l'heure de la dernière prise - prise-Taux résiduel avant la première prise de la journée						
DIGO	DIGOXINE SANGUINE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 12h
	Préciser le nom du médicament, la posologie ainsi que la date et l'heure de la dernière prise Commentaire(s) pré-analytique(s) : -Taux résiduel avant la première prise de la journée -Digoxine au moins 6h à 8h après la dernière prise						
E2	ESTRADIOL	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	prélever le matin	TA	<24h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : PRECISER DDR ET METTRE EN URGENT SI DEMANDE PMA						
ELEC	ELECTROPHORESE DES PROTEINES	Sang	SEC ROUGE 5 mL	3 j		TA	< 24h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Analyse Réalisée le Lundi, mardi et jeudi						
FAC10	FACTEUR 10	Non spécifiée	CITRATE BLEU 5 mL	3 j		TA	<1 h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Contraintes pré-analytiques importantes, prélèvement à réaliser au laboratoire						
FAC11	FACTEUR 11	Non spécifiée	CITRATE BLEU 5 mL	3 j		TA	< 1 h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Contraintes pré-analytiques importantes, prélèvement à réaliser au laboratoire						
FAC12	FACTEUR 12	Non spécifiée	CITRATE BLEU 5 mL	3 j		TA	< 1h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Contraintes pré-analytiques importantes, prélèvement à réaliser au laboratoire						
FAC5	FACTEUR 5	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	3 j		TA	< 1h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Contraintes pré-analytiques importantes, prélèvement à réaliser au laboratoire						
FAC7	FACTEUR 7	Non spécifiée	CITRATE BLEU 5 mL	3 j		TA	< 1h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Contraintes pré-analytiques importantes, prélèvement à réaliser au laboratoire						
FAC9	FACTEUR 9	Non spécifiée	CITRATE BLEU 5 mL	3 j		TA	< 1h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Contraintes pré-analytiques importantes, prélèvement à réaliser au laboratoire						
FERRI	FERRITINE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	<1J
FIB	FIBRINOGENE	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	1 j		TA	< 1j
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Tube impérativement bien rempli au trait de jauge						
FOR	FORMULE SANGUINE	Sang	EDTA VIOLET 5 mL	1 j		TA	< 24h
FSH	FSH	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	Cycle nyctéméral prélever le matin	TA	< 7 j
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : PRECISER DDR						

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
G	GLYCEMIE	Sang	FLUORURE GRIS 5 mL	1 j	A jeun depuis 12h	TA	< 24h
GA	GLYCEMIE A (non a jeun) urgences...	Sang	FLUORURE GRIS 5 mL	1 j	A jeun depuis 12h	TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : gly non a jeun ou jeun inconnu (urgences ...)</i>						
GDS	GAZOMETRIE	Sang artériel	SERINGUE GAZ du SANG	1 j		Dana la glace	<30 mn
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Chasser la bulle d'air si présence au plvt avant d'homogénéiser délicatement la seringue.</i>						
GGT	GAMMA GT	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
GLCR	GLYCORACHIE (urgent)	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON STERILE SANS BORATE	3 h		TA	<24h
GPP	GLYCEMIE POST PRANDIALE	Sang	FLUORURE GRIS 5 mL	1 j	1H30 à 2h APRES LA FIN DU REPAS	TA	< 24h
GR	Groupe Sanguin	Sang	Tube EDTA K3 (violet)	1 j		TA	<24h
	<i>Prénom, Date de naissance + nom de jeune fille OBLIGATOIRE</i>						
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Le contrôle d'identité doit impérativement être réalisé par le préleveur</i>						
	<i>Prévoir un tube spécifique</i>						
HAPTO	HAPTOGLOBINE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
HBPM	ANTI Xa	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	1 j		TA	< 2h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : stabilité = birri et al</i>						
HCG	HCG	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : PRECISER DDR</i>						
HEMOC	HEMOCULTURE	Sang	FLACON HEMOCULTURE	8 j		TA	< 12h
	<i>Noter la température</i>						
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever 2 à 3 paires (aérobie/anaérobie) pour les adultes, quantité requise 10 mL (CF repère sur le flacon)</i>						
	<i>Prélever 1 flacons pédiatriques pour les enfants quantité variable en fonction du poids (CF manuel de prélèvement)</i>						
HEPC	HEPATITE C	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 1j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus</i>						
HHCG	HCG HOMME	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7 j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus</i>						
HIV	VIRUS IMMUNODEFICIENCE HUMAINE	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	<24h
HT	HEMATOCRITE	Sang	EDTA VIOLET 5 mL	1 j		TA	< 24h
IGA	IGA	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 8j
IGE	IgE TOTALES	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	<1J
IGG	IGG	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	<11j
IGM	IGM	Sang		1 j		TA	<17j
INFLU	VIRUS GRIPPAL	Non spécifiée	FLACON STERILE SANS BORATE	1 j		2-8°C	<24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Recueil sur flacon stérile ou écouvillon</i>						
K	POTASSIUM PLASMATIQUE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 6h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : EVITER L HEMOLYSE</i>						

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
KSER	POTASSIUM SERIQUE	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 6h
KT	CATHETER, DRAIN, CHAMBRE IMPLANTABLE	Bactério: Urines ou Non spécifié	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		2-8°C	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <4h si conservation à TA</i>						
LDH	LACTO DESHYDROGENASE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 6h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : EVITER L HEMOLYSE</i>						
LEGIO	LEGIONELLES ANTIGENES SOLUBLES	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		2-8°C	< 14j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <24h si conservation à TA</i>						
LGAS	LIQUIDE GASTRIQUE	Non spécifiée	FLACON STERILE SANS BORATE	3 j		TA	< 2h
LH	LH	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : PRECISER DDR</i>						
LIPA	LIPASE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
LPONC	LIQUIDE DE PONCTION	Bactério: Urines ou Non spécifié	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		TA	< 12h
METHB	METHEMOGLOBINE	Sang artériel	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 4h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Tube parfaitement rempli</i>						
MG	MAGNESIUM	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	A jeun depuis 12h	TA	< 1j
MHAV	HEPATITE A IGM	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus Contexte d'hépatite aigue</i>						
MNI	MNI TEST	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 7j
MYCOP	Recherche de MYCOPLASMES (uret, vaginal, urine, sperme)	Bactério: Urines ou Non spécifié	milieu spécifique mycoplasme	4 j		2-8°C	<48h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Pour mycoplasme génital prélèvement sur écouvillon avec milieu de transport, délai <24h si conservation à 2-8°C et <2h à TA si prélèvement avec écouvillon sec</i>						
MYELO	MYELOGRAMME	Sang		5 j			
NA	SODIUM	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 4j
OEIL	BACTERIO OEIL	Bactério: Muqueuse, Peau	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever avec écouvillon contenant un milieu de transport</i>						
ORL	BACTERIO GORGE	Bactério: Muqueuse, Peau	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever sur écouvillon avec milieu de transport sinon délai conservation <2h à TA pour prélèvement avec écouvillon sec</i>						
OSMP	OSMOLARITE PLASMATIQUE	Non spécifiée		1 j			
PAL	PHOSPHATASES ALCALINES TOTALES	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 4j
PALU	RECHERCHE DE PALUDISME (urgent)	Non spécifiée	EDTA VIOLET 5 mL	4 h		TA	< 1j

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Préciser si voyage récent (lieu et date) Préciser le traitement en cours</i>						
PARA	PARACETAMOL (urgent)	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	<24h
PBNP	PRO-BNP	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 48h
PCT	PROCALCITONINE	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 24h
PDF	Produits de dégradation de la fibrine	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	1 j		TA	< 2h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Contraintes pré-analytiques importantes, prélèvement à réaliser au laboratoire</i>						
PERI	PERIPHERIQUES NOUVEAU NE	Non spécifiée	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	3 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever sur écouvillon avec milieu de transport sinon délai conservation <2h à TA pour prélèvement avec écouvillon sec</i>						
PHO	PHOSPHORE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 6h
PLCR	PROTEINORACHIE (urgent)	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON STERILE SANS BORATE	3 h		TA	24H
PNEUMO_URPNEUMOCOQUE ANTIGENES SOLUBLES URINES INAIRE		Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		2-8°C	< 14j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <24h si conservation à TA</i>						
PQS	PLAQUETTES	Sang	EDTA VIOLET 5 mL	1 j		TA	< 4j
PREAL	PREALBUMINE	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 12h
PRL	PROLACTINE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 2j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Préciser DDR et contexte clinique Après 15 min de repos, entre 8h ET 10H</i>						
PROG	PROGESTERONE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	<7J
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : PRECISER DDR</i>						
PSA	PSA	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus</i>						
PSAL	PSA LIBRE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus</i>						
PSEL	PARASITOLOGIE SELLES	Bactério: Urines ou Non spécifié	POT A SELLES	2 j		TA	< 24h
PTH	PTH	Sang	EDTA VIOLET 5 mL	1 j		TA	< 1j
PU	PRELEVEMENT URETRAL	Bactério: Gynécologique	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever sur écouvillon avec milieu de transport sinon délai conservation <2h à TA pour prélèvement avec écouvillon sec</i>						
PUSF	BACTERIOLOGIE PUS PROFOND	Bactério: Muqueuse, Peau	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever sur écouvillon avec milieu de transport sinon délai <24h si conservation à 2-8°C pour prélèvement avec écouvillon sec</i>						
PUSO	PUS OUVERT . PLAIES	Bactério: Muqueuse, Peau	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever sur écouvillon avec milieu de transport sinon délai <24h si conservation à 2-8°C pour prélèvement avec écouvillon sec</i>						

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
PV	PRELEVEMENT VAGINAL	Bactério: Gynécologique	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		TA	< 24h
	Prélever sur écouvillon avec milieu de transport sinon délai conservation <2h à TA pour prélèvement avec écouvillon sec						
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Milieu de transport spécifique pour recherche de chlamydiae						
	CF fiche de prélèvement						
RA	RESERVE ALCALINE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
RAI	Recherche Agglutinines Irrégulières	Sang	EDTA VIOLET 5 mL	1 j	Transfusion, Injection d'Anti D	TA	<24h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : sur anticoagulant citrate, EDTA ou CPD-A (sinon sérum.)3j ambiante, 1sem 2-8°C, 1an -20°C (CLSI) le sérum doit être obtenu par centrifugation à 1500 g pendant 15 minutes pour éviter des résidus de fibrine.						
REDON	liquide de REDON	Bactério: Urines ou Non spécifié	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		2 - 8°C	< 24h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <4h si conservation à TA						
RETI	Réticulocytes	Sang	EDTA VIOLET 5 mL	1 j		TA	<48h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : s= ABC 2012 GODON et al valeurs normales hematocell 25-100 G/L						
ROTADENO	ROTAVIRUS ADENOVIRUS NOROVIRUS DANS LES SELLES	Bactério: Urines ou Non spécifié	POT A SELLES	1 j		2-8°C	< 24h
RPR	SYPHILIS	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 24h
SANS2	SANG DANS LES SELLES 2eme echantillon	Non spécifiée	POT A SELLES	1 j		2-8°C	< 72h
SANS3	SANG DANS LES SELLES 3 eme echantillon	Non spécifiée	POT A SELLES	1 j		2-8°C	< 72h
SANSE	SANG DANS LES SELLES 1 echantillon	Non spécifiée	POT A SELLES	1 j		2-8°C	< 72h
SCMV	CMV	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 24h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus						
SCOV	SEROLOGIE COVID	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 24h
SDHEA	SULFATE DE DHEA	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	<2J
SEBV	EBV	Sang	SEC + GEL JAUNE 5 mL	36 h		TA	< 24h
			SEC ROUGE 5 mL	36 h		TA	< 24h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus						
SHEL	SEROLOGIE HELICOBACTER	Non spécifiée	SEC ROUGE 5 mL	1 h		TA	<7 j
SPERC	SPERMOCULTURE	Non spécifiée	FLACON STERILE SANS BORATE	3 j		TA	< 2h
SPOT	SPOT URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	< 7j
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : SUR ECHANTILLON SANS CONSERVATEUR						
SRUB	RUBEOLE IGG	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 24h
STER	STERILET - DIU	Bactério: Muqueuse, Peau	ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT	4 j		2-8°C	< 24h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai <4h si conservation à TA						
STOXO	SEROLOGIE TOXOPLASMOSE	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 24h
	Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélever un tube sec gel jaune en plus						

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
STRF	SATU TRANSFERRINE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 1j
SYNAC	TEST AU SYNACTHENE CORTISOL	Sang		1 j		TA	< 7j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Prélèvement à réaliser au laboratoire</i>						
T3L	T3L	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	Avant prise de traitement si il y a lieu	TA	< 2j
T4L	T4L	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	Avant prise de traitement si il y a lieu	TA	< 2j
TCA	TCA	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	1 j		TA	< 8h
TCD	Test de Coombs direct	Non spécifiée	EDTA VIOLET 5 mL	1 h		TA	< 3j
TESTO	TESTOSTERONE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	Cycle nyctéméral prélever le matin	TA	< 24h
TG	TRIGLYCERIDES	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	A jeun depuis 12h	TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : A JEUN STRICT</i>						
TGO	ASPARTATE AMINO-TRANSFERASE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7J
TGP	ALANINE AMINO TRANSFERASE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 4j
THYR	THYROGLOBULINE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7j
THYROG	THYROGLOBULINE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7j
TPINR	INR	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	1 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Préciser le traitement et la posologie</i>						
TPQ	TP TQ (TP simple)	Sang	CITRATE BLEU 5 mL	1 j		TA	< 24h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Préciser traitement et posologie</i>						
TRF	TRANSFERRINE	Sang		1 j	A jeun strict	TA	< 11j
TRIC	TRICYCLIQUES ANTIDEPRESSEURS DEPISTAGE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	Absence d'information
TROPO	TROPONINE T	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 8h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : EVITER L HEMOLYSE</i>						
TSH	TSH	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 7j
U	UREE	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j		TA	< 24h
UAC	ACETONURIE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	< 24h
UAD	ALBUMINURIE ECHANTILLON	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	< 7j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : SUR ECHANTILLON SANS CONSERVATEUR</i>						
UADD	COMPTE D'ADDIS	Bactério: Urines ou Non spécifié		1 j		2-8°C	< 24h

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
	<i>Recueil sur 3 h</i> <i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Délai < 2h si conservation à TA</i> <i>CF fiche de prélèvement</i>						
UAMY	AMYLASE URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	<2j
UAU	ACIDE URIQUE URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j			< 4j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : De préférence sur urines de 24 h non réfrigérée si impossible Sur échantillon sans conservateur</i>						
UBARBI	BARBITURIQUES URINAIRES DEPISTAGE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	<1J
UBENZO	BENZODIAZEPINE DEPISTAGE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	<1J
UC	CREATININE URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	< 2j
			FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	< 2j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Sur échantillon sans conservateur ou urines de 24h</i>						
UCA	CALCIUM URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	2J
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : SUR URINES DE 24H</i>						
UCANNA	CANNABIS URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	<1J
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : SUR ECHANTILLON SANS CONSERVATEUR</i> <i>CONTROLLER LE RECUEIL ET L IDENTITE SI DEMANDE</i>						
UCL	CHLORE URINAIRE	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	< 7h
UDENS	DENSITE URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		2-8 °C	< 4h
UGD	GLUCOSE URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	< 2h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : SUR ECHANTILLON SANS CONSERVATEUR</i>						
UK	POTASSIUM URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	< 45j
UMG	MAGNESIUM URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	<3j
UMIC	MICROALBUMINURIE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	< 7j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : SUR ECHANTILLON SANS CONSERVATEUR</i>						
UNA	SODIUM URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	< 4j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Sur urines de 24h pour les adultes</i>						
UNIT	NITRITES URINAIRES	Non spécifiée		1 j		TA	<1h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Conservation à 2-8°C si délai >1h</i>						
UPH	pH URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	<1h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Conservation à 2-8°C si délai >1h</i>						
UPHO	PHOSPHORE URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	<2J
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : SUR URINES DE 24H</i>						
UPIGB	PIGMENTS ET SELS BILIAIRES	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	<1h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Conservation à 2-8°C si délai >1h</i>						
UPROT	PROTEINES URINAIRES	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	<7j
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Sur échantillon sans conservateur ou urines des 24h</i>						

Code	Analyse	Nature	Tube	Délai de rendu	Condition de prélèvement	Conservation avant traitement	Stabilité avant traitement
USANG	RECHERCHE DE SANG DANS LES URINES	Bactério: Urines ou Non spécifié		1 j		TA	< 4h
UTRICY	TRICYCLIQUES URINAIRES DEPISTAGE	Non spécifiée	FLACON URINES ECHANTILLON	1 j		TA	<1J
UU	UREE URINAIRE	Non spécifiée	FLACON URINES DES 24H	1 j		TA	<2J
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : SUR ECHANTILLON SANS CONSERVATEUR OU URINES DES 24H</i>						
VB12	VITAMINE B12	Sang	HEPARINATE DE Li VERT 5 mL	1 j	A jeun depuis 12h	TA	< 3j
VITD	VITAMINE D	Sang	SEC ROUGE 5 mL	1 j		TA	< 3j
VRS	VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL, VRS	Bactério: Urines ou Non spécifié	FLACON STERILE SANS BORATE	1 j		2-8°C	<4h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Recueil sur flacon stérile ou écouvillon sec</i>						
XAREL	ANTI Xa	Sang	CTAD BIEU anneau JAUNE	1 j		TA	< 2h
	<i>Commentaire(s) pré-analytique(s) : Préciser le traitement et la posologie + heure d'injection stabilité = birri et al</i>						